

## MIARKA PD

Wydrukuj miarkę (rozmiar strony musi wynosić 100%, bez skalowania).

Wytnij miarkę i zmierz za pomocą standardowej linijki, sprawdź czy skala jest prawidłowa.

Złóż miarkę w pół a następnie umieść miarkę nad oczyma tak aby wcięcie znajdowało się w miejscu mostka okularów na nosie. Poproś drugą osobę o odczytanie wartości z linijki - odległość od zera na miarce do środka źrenicy oka lewego wtedy otrzymujemy PD oka lewego, następnie odczytujemy odległość od zera na miarce do środka źrenicy oka prawego wtedy otrzymujemy PD oka prawego.

Jeżeli wartości PD różnią się, w formularzu na stronę podaj osobno PD dla oka prawego i lewego. Jeśli się nie różnią zsumuj obie wartości i podaj w formularzu jako PD

Pomiaru należy dokonać dwa lub trzy razy aby wynik był bardziej miarodajny.

